


Делать больше с меньшими затратами

Интегрированная
автоматизация на 6 кв. метрах
для Atellica Solution¹

siemens-healthineers.com/atellicasolution



Интегрированная автоматизация Atellica объединяет в себе революционную систему менеджмента образцов, интеллектуальное программное обеспечение и информационные технологии (ИТ), которые обеспечивают продуктивность и гибкость рабочего процесса, позволяя использовать процедуру снятия крышек без дополнительных затрат.

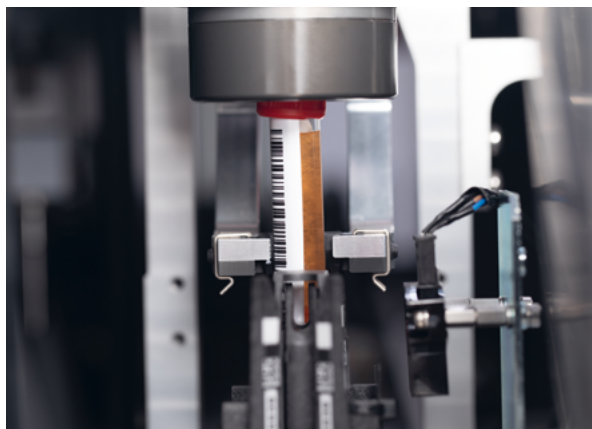

Atellica Solution¹

Atellica Solution¹ — гибкая, масштабируемая, автоматизированная система иммунохимических и биохимических анализаторов. Система обеспечивает тот уровень контроля и легкости в работе, который позволяет улучшать результаты.

Испытайте все возможности Atellica Solution¹ с патентованной технологией двунаправленного магнитного транспорта, возможностью создания более 300 настраиваемых конфигураций и широким меню тестов, использующих надежные методы детекции.



Революционная технология менеджмента образцов

обеспечивает независимый контроль срочных и рутинных образцов для биохимических и иммунохимических исследований.

- Автоматизированный контроль качества с **охлаждаемым отсеком для хранения 60 контролей качества на борту системы** позволяет сотрудникам сосредоточиться на клинических результатах.

- Двухнаправленный транспорт проб с изменяющейся скоростью и **интеллектуальным планированием** обеспечивает предсказуемый TAT, STAT и бережную транспортировку ценных образцов.

- **Индивидуальный транспорт образцов и прямая аспирация из пробирок** обеспечивает гибкую маршрутизацию и сокращает количество узких мест по сравнению с транспортировкой с использованием штативов.

- **Возможность использования более 40 типов пробирок** для образцов минимизирует необходимость в предварительной сортировке и снижает количество аликвот перед загрузкой образцов.

- Многокамерная система видеоконтроля с углом обзора 360° предназначена для уменьшения количества ошибок считывания штрих-кодов, обработки исключений и снижения потребности во вмешательстве оператора (пробирки можно загружать в любой ориентации).

- **Atellica Sample Handler²** предлагает высокую вместимость — до 440 пробирок.

- **Автоматическая проверка объема образца для небольших пробирок** помогает сэкономить время оператора.

Встроенная автоматическая сортировка образцов в сочетании с функциями возврата и архивирования

позволяет управлять образцами на всех этапах исследования (преаналитическом, аналитическом и постаналитическом) и позволяет сократить количество ручных операций, стандартизировать рабочие процессы и минимизировать TAT.

Современное и простое в использовании программное обеспечение

с оптимальным подключением к ЛИС. Это современное решение существенно упрощает работу в лаборатории.

- **Atellica ASA** — приложение для планшетов, которое систематизирует и приоритезирует задачи оператора, быстро и легко оптимизирует рабочий процесс в лаборатории.

- **Гибкое управление данными** улучшает качество обработки результатов и образцов.
— Строгий контроль образцов (повышение продуктивности лаборатории).

- Автоматическая проверка (упрощение валидации результатов).

- Контроль качества и калибраторы на борту (автоматизация процессов).

- **Дистанционная поддержка** (удобный безопасный мониторинг системы, включая поиск и устранение неисправностей и техническое обслуживание системы).

Atellica Decapper²

Интеграция процедуры снятия крышек с аналитическим рабочим процессом Atellica Solution¹ с минимальным использованием дополнительного пространства*.

¹ Анализатор автоматический биохимический Atellica CH 930, в вариантах исполнения, с принадлежностями. РУ № РЗН 2020/12079. Система сортировки и транспортировки пробирок с образцами Atellica SH с принадлежностями, варианты исполнения: Atellica SH Prime, Atellica SH Additional. РУ № РЗН 2020/11859. Анализатор автоматический иммунохимический серии Atellica IM, в вариантах исполнения, с принадлежностями. РУ № РЗН 2020/12316.

² Система сортировки и транспортировки пробирок с образцами Atellica SH с принадлежностями, варианты исполнения: Atellica SH Prime, Atellica SH Additional. РУ № РЗН 2020/11859.

Atellica, Atellica Asa и и все связанные с ними марки являются товарными знаками компании Siemens Healthcare Diagnostics Inc. или ее дочерних организаций. Все прочие приведенные здесь товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

**Генеральное представительство
Siemens Healthineers**
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Эрланген, Германия
Тел.: +49 9131 84-0
siemens.com/healthineers

Контактная информация в России
ООО «Сименс Здравоохранение»
115093, Россия, г. Москва
ул. Дубининская, 96
Телефон: +7 495 737 12 52
Факс: +7 495 737 13 20
siemens-healthineers.com/ru

Доступность изделия может меняться в зависимости от страны и регулируется в соответствии с различными нормативно-правовыми требованиями. Уточните доступность у локального представителя.

Информация, представленная в настоящей брошюре, предназначена исключительно для медицинских работников.