



Анализ мочи на тест-полосках Siemens-Healthineers

Широкий выбор решений под каждого клиента




Одна тест-полоска для анализа мочи может предоставить обширную клиническую информацию. Независимо от того, проводится ли тестирование в кабинете врача, клинике или больнице, наша линейка тест-полосок для анализа мочи помогает выявлять широкий спектр заболеваний, включая инфекции мочевыводящих путей, диабет и ранние стадии заболеваний почек. В сочетании с нашей лидирующей в отрасли линейкой анализаторов CLINITEK® компания Siemens Healthineers повышает точность тестирования и производительность персонала за счет автоматизации вашей тестовой среды, устранения субъективности визуальных тестов и сокращения ошибок при вводе данных.

Быстрота и простота использования

Результаты анализа мочи с помощью тест-полосок можно использовать вместе с другой диагностической информацией для диагностики или исключения определенных заболеваний, а также для определения необходимости микроскопического исследования.

Анализ мочи с помощью тест-полосок может указывать на следующие клинические состояния:

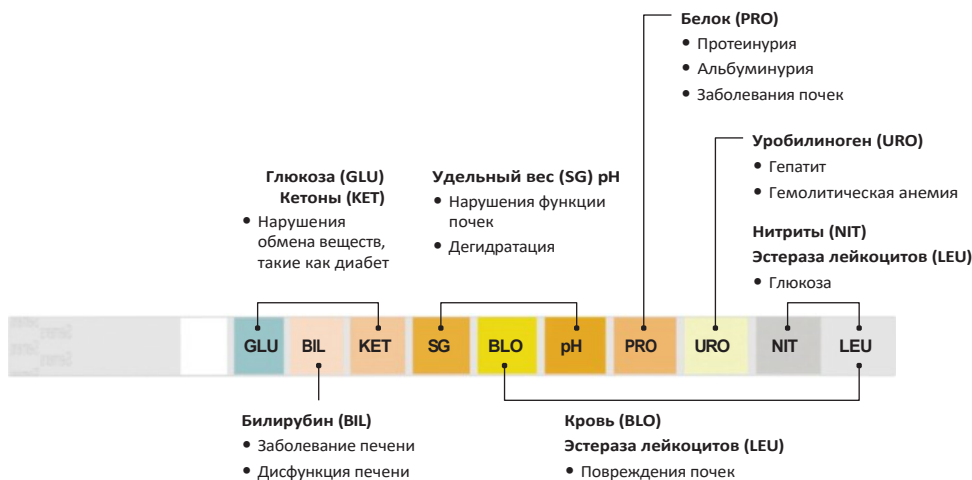

Быстрое и надежное тестирование для мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями

Серия тест-полосок STIX представляет собой решение для первичного скрининга таких заболеваний, как инфекции мочевыводящих путей, диабет и почечные нарушения. Нет необходимости отправлять образцы в лабораторию. Проводите тесты прямо в своем кабинете и быстро получайте результаты.

	GLU	BIL	KET	SG	BLO	pH	PRO	URO	NIT	LEU	CRE	PRO.LO	ALB
Реактивные полоски Multistix® 10 SG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Реактивные полоски Multistix 8 SG	•		•	•	•	•	•		•	•			
Тест-полоски Multistix GP	•		•	•	•	•	•		•	•			
Реактивные полоски Multistix PRO® 10 LS	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	
Тест-полоски Uristix®	•						•						
Реактивные полоски Uristix 4	•						•		•	•			
Реактивные полоски Albustix®*							•						
Реактивные полоски Microalbustix®*											•		•

**Только визуальное считывание.*



Соблюдайте следующие важные рекомендации, чтобы обеспечить точность результатов анализа:²

Обращение с образцами

- Соберите образец в чистый и сухой контейнер.
- Можно использовать образцы, взятые в любое время суток.
- Проведите тестирование свежей пробы в течение 2 часов после сбора.
- Если тестирование не проводится в течение 2 часов, храните образец в холодильнике при температуре от 2 °C до 8 °C не более 72 часов.
- Перед тестированием довести охлажденные образцы до комнатной температуры.

Рекомендации по тестированию

- См. вкладыш в упаковке с реагентом для ознакомления с ограничениями, факторами, влияющими на результаты, условиями хранения и сроком годности продукта.
- Плотно закрутите крышку на флаконе с реагентом и храните флакон надлежащим образом, когда он не используется.
- Используйте часы или секундомер для обеспечения точности времени считывания.
- Убедитесь, что считывание показаний производится в хорошо освещённом помещении.
- Не используйте тест-полоску с истекшим сроком годности.

Правильное погружение

Для оптимального проведения теста важно использовать правильную технику погружения и обращения с тест-полоской. Не прикасайтесь к тестовым участкам, включая идентификационные полосы.

Проведение теста на анализаторе CLINITEK Status+



Окуните тест-полоску в образец мочи, смачивая все подушечки.

Примечание: при правильном выполнении процедуры окунания можно смачивать и контрольную полосу.



Извлеките полоску из мочи, проведя ее краем по стенке пробирки.



Промокните полоску, прикоснувшись ее краем к бумажному полотенцу, чтобы удалить излишки мочи.



Поместите тест-полоску в канал стола тестовыми подушечками вверх. Протолкните тест-полоску до конца канала. Не прикасайтесь к тестовым подушечкам


тест-полоски.

Проведение теста на анализаторе CLINITEK Advantus:



Окуните тест-полоску в образец мочи, смачивая все подушечки.

Примечание: при правильном выполнении процедуры окунания можно окунуть и контрольную полосу.

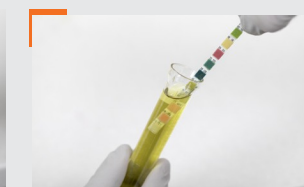

Извлеките полоску из мочи, проведя ее краем по стенке пробирки, чтобы удалить излишки мочи.



Поместите тест-полоску в зону загрузки полосок анализатора.

Инструкции по визуальному считыванию



Окуните тест-полоску в образец мочи, смачивая все подушечки.



Удалите полоску из мочи, проведя ее краем по стенке пробирки.



Промокните полоску, прикоснувшись ее краем к бумажному полотенцу, чтобы удалить излишки мочи.



Держите полоску рядом с цветовыми блоками на этикетке флакона. Сравните и тщательно сопоставьте каждую тестовую полоску с соответствующим рядом цветовых блоков. Оцените каждую полоску в течение времени, указанного на этикетке.

Albustix, CLINITEK, CLINITEK Advantus, CLINITEK Status, Microalburstix, Multistix, Multistix PRO, STIX, Uristix и все связанные с ними знаки являются товарными знаками, принадлежащими или лицензированными Siemens Healthcare Diagnostics Inc. или ее аффилированными компаниями. Все остальные товарные знаки и бренды являются собственностью их соответствующих владельцев.

Доступность продукта может варьироваться в зависимости от страны и зависит от различных нормативных требований. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным представителем для уточнения доступности.

Штаб-квартира Siemens Healthineers

Siemens Healthcare GmbH Henkestr. 127
91052 Эрланген, Германия
Телефон: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com

Издано

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Диагностика на месте оказания
медицинской помощи
2 Edgewater Drive
Норвуд, Массачусетс 02062-4637,
США
Телефон: +1 781-269-3000

Ссылки:

1. Simerville JA, Maxted WC, Pahira JJ. Анализ мочи: всесторонний обзор. Am Fam Physician. 2005;71:1153-62.
2. Nichols JH, Rauch CA, Laposata M. (2013). Клиническая химия: качество лабораторной диагностики (диагностика)

Стандарты оказания медицинской помощи. 1-е изд. Demos Medical.